

Información para pacientes

Unos dientes bonitos gracias a **Cerámica sin metal**



ivoclar
vivadent®

El deseo natural de unos dientes bonitos

Existen muchas razones por las que usted busca el consejo profesional de su dentista. Un diente puede necesitar ser reparado, o incluso reemplazado si ha sufrido un daño mayor. Tal vez usted ya utilice diferentes medidas para cuidarlos o quiera hacer algo para conseguir que sus dientes sean más atractivos, el resultado en cualquier caso no es simplemente buscar aumentar su propia autoestima sino también mejorar su imagen privada y profesional con éxito.

El deseo de tener unos dientes bonitos es absolutamente natural – por ello es una buena razón el prestar atención a la selección y calidad de la restauración. Su dentista puede ayudarle a conseguir sus deseos y necesidades individuales. Ivoclar Vivadent ofrece un amplio rango de productos que le ofrecen permitirán conseguir tener unas restauraciones naturales. En realidad, una buena restauración es aquella que no puede reconocerse a simple vista como tal.



¿Por qué la cerámica sin metal es la mejor opción?

En los últimos años, ha ido aumentando el número de restauraciones de cerámica sin metal realizadas, ya que dichos materiales alcanzan las más altas cotas estéticas y son biocompatibles. Estas restauraciones cerámicas no tienen una estructura metálica. Por ello, la luz puede atravesar las restauraciones de la misma manera en que lo hace en un diente natural. Además, la encía adyacente a las mismas no muestra ningún borde metálico oscuro.

La cerámica sin metal no causa ningún tipo de reacciones alérgicas no deseadas, como pueden ser decoloraciones de las membranas mucosas o cambio en los sabores. Por ello se dice que son biocompatibles. El material cerámico es resistente a la abrasión y estable en color. Además, su baja conductividad térmica protege el nervio dental, el cual es muy sensible a los cambios de temperatura.



Materiales coordinados y comprobados de un único fabricante – *IPS Empress* e *IPS e.max*

Las restauraciones de cerámica sin metal son las mejores soluciones estéticas.

Ivoclar Vivadent lanzó el sistema IPS Empress hace más de 15 años. Su larga experiencia clínica con el sistema y las más de 33 millones de restauraciones fabricadas con el mismo hablan por sí solas. Hoy en día, los laboratorios utilizan IPS Empress Esthetic para fabricar inlays, onlays, carillas y coronas con la más alta estética.

Tal vez su dentista se beneficie de la posibilidad de fabricar la restauración directamente en la clínica utilizando el sistema CEREC®. Una vez que el diente preparado se ha escaneado con una cámara, el dentista construye la corona (por ejemplo) en el ordenador. A continuación, una máquina de fresado realiza la restauración a partir de un bloque cerámico prefabricado, como es IPS Empress CAD, y su dentista puede directamente colocar la corona en su boca.



Un sistema de cerámica sin metal moderno, se caracteriza por contar con pocos y coordinados materiales sin metal-IPS e.max es ese sistema. Incluye tanto componentes con alta resistencia como con alta estética, los cuales han sido desarrollados para trabajar entre sí. Dependiendo de el tipo de defecto que necesite ser corregido, su dentista elije el material con la resistencia específica necesaria para el mismo, a partir del cual se crea una estructura para reemplazar dicho diente. Una

vez que la estructura de cerámica sin metal se ha construido, el protésico cubre o maquilla el mismo con un material de cerámica especial. Independientemente del tipo de material de estructura utilizado, el material que lo cubre es siempre el mismo. Por ello, dos o más restauraciones de IPS e.max serán exactamente iguales en color. IPS e.max está indicado para la realización de puentes y coronas – aunque pueden fabricarse incluso carillas con este material.



Diferentes materiales para diferentes necesidades

Son posibles diferentes métodos de tratamiento, dependiendo del tipo de defecto que se quiera corregir:

INLAY/ONLAY

Si un diente solo está dañado en parte – p.e. debido a una caries – una obturación puede ser solución suficiente. Las obturaciones de color metálico de amalgama, sin embargo, son algo que pertenece al pasado. Si el dentista no puede fabricar la obturación directamente con una resina de color dentinario

(composite), la alternativa es realizar un inlay o un onlay. Estas “obturaciones” de color dentinario pueden realizarse en un laboratorio utilizando IPS Empress Esthetic o fresarse en bloques cerámicos, tales como IPS Empress CAD. Ambas opciones ofrecen una óptima restauración estética del diente.

antes

Diente posterior restaurado con amalgama



después

La alternativa estética de alta calidad: IPS Empress Esthetic inlays/onlays.



Dr. U. Brodbeck y Arteco Dentaltechnik, Suiza

CARILLAS

Los dientes fracturados, decolorados o que necesiten pequeñas correcciones pueden ser tratados de manera rápida y sencilla con carillas.

Las carillas son delgadas láminas hechas de cerámica, las cuales se adhieren al diente y – a

diferencia de las coronas – no lo cubren en su totalidad. Sólo una pequeña porción de la estructura dental necesita ser tratada para colocar las carillas. La restauración completada es tan natural en apariencia como sus dientes adyacentes.

antes

Diente anterior decolorado



después

La alternativa estética de alta calidad:
Carillas IPS Empress CAD.



Dr. J. Klim, USA

El material adecuado para cada situación

CORONAS

Los dientes que sufran un daño más extenso pero cuenten con la suficiente estructura vital, pueden restaurarse o mejorarse con coronas de cerámica sin metal. Con este propósito, se elimina toda la dimensión exterior visible del área del diente y se

reemplaza con una "cubierta" de cerámica sin metal de color dentinario.

Restauraciones antiguas que sean poco atractivas pueden también ser sustituidas por restauraciones de apariencia natural y estéticas a la vista.

antes

Coronas anteriores con estructura metálica



después

La alternativa estética de alta calidad: Coronas IPS e.max



Dr. D. Edelhoff, O. Brix, Alemania

PUENTES

Si falta un diente completo, puede ser reemplazado por un puente, el cual se soporta por dos “muñones” sanos. En el pasado, los dientes siempre eran fabricados con una estructura metálica por razones de estabilidad y resistencia. Dicha estructura entonces era recubierta con cerámica para

obtener el resultado deseado. Gracias a las nuevas tecnologías y material, ahora es posible el fabricar puentes de cerámica sin estructura metálica. Por ejemplo, el óxido de circonio IPS e.max, es el material elegido para estas estructuras, ya que es biocompatible, translucido y excepcionalmente resistente.

antes

Puente posterior con estructura metálica



después

La alternativa estética de alta calidad:
Puente IPS e.max.



V. Brosch, Alemania

Los mejores requisitos para sus nuevos dientes y una sonrisa brillante

Su dentista estará encantado de informarle si la cerámica sin metal es la óptima solución estética y funcional para usted. Ivoclar Vivadent le ofrece el producto adecuado sea cual sea la situación. Todos los productos

son ofrecidos por un único fabricante para asegurarle un procedimiento seguro. Sus nuevos dientes parecerán y los sentirá tan naturales, que solo usted y su dentista conocerán la diferencia.

TÓMESE SU TIEMPO EN DECIDIR TENER UNA SONRISA
BRILLANTE Y NATURAL. ESTA ES UNA DECISIÓN
IMPORTANTE.

¡NO LA DEJE AL AZAR!



¡Hable con nosotros! Déjese aconsejar por su odontólogo

La competencia y experiencia de su odontólogo le servirán de ayuda a la hora de elegir la mejor solución.

Si desea conocer más detalles de los materiales de cerámica sin metal de Ivoclar Vivadent puede visitarnos en www.ivoclarvivadent.com

Sello de la clínica

Ivoclar Vivadent S.A.
c/Emilio Muñoz, 15
Esquina c/Albarracín
E-28037 Madrid
España
Tel. + 34 91 375 78 20
Fax + 34 91 375 78 38
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent Marketing Ltd.
Calle 134 No. 13-83,
Of. 520
Bogotá
Colombia
Tel. +57 1 627 33 99
Fax +57 1 633 16 63
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent S.A. de C.V.
Av. Mazatlán No. 61,
Piso 2
Col. Condesa
06170 México, D.F.
México
Tel. +52 (55) 5062-1000
Fax +52 (55) 5062-1029
www.ivoclarvivadent.com.mx

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
FL-9494 Schaan
Principality of
Liechtenstein
Tel. +423 / 235 35 35
Fax +423 / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com



ivoclar
vivadent®